



Building Confidence
with CPR Feedback



PUHDISTUSSUOSITUKSET

Prestan elvytyssimulaattorit ja lisävarusteet

Prestan simulaattoreiden vartalo ja kasvot voidaan pyyhkiä saippuavedellä, yleisimmillä puhdistusaineilla tai desinfiointipyyhkeillä. Kasvonahka voidaan puhdistaa alkoholipyyhkeillä. Desinfointia suositellaan jokaisen harjoittelijan jälkeen.



Prestan AED harjoituslaite & tarvikkeet

AED laitteen ulkopinta, kaukosäädin, kaapelit ja harjoituselektronien päällinen voidaan pyyhkiä vähäisellä saippuavedellä, yleisimmillä puhdistusaineilla tai desinfiointipyyhkeillä.

AED laitteen harjoituselektronit sisältävät sähköisiä osia, joten niiden puhdistaminen tulee tehdä ainoastaan elektronien päältä. Liimapinnan puolelle ei saa laittaa kosteita puhdistustuotteita.

HUOMIOITHAN ETTÄ: Harjoituselektronien uudelleenkäytettävä liimapintaa ei voi puhdistaa. Nesteen joutuminen harjoituselektronien liimapintaan heikentää elektronin tarttuvuutta ja voi johtaa laitteen takuun raukeamiseen.

Prestan säilytuspussit

Kaikki Prestan säilytuspussit voi pyyhkiä saippuavedellä, yleisimmillä puhdistusaineilla tai desinfiointipyyhkeillä.

Lisäsuositukset

Yleisten suositusten mukaisesti suosittelemme käyttämään kertakäyttöhanskoja, kun laitteita puhdistetaan. Hävitähän hanskat puhdistuksen jälkeen yleisten ohjeistusten mukaisesti ja puhdistat kädet käsineiden hävityksen jälkeen.

LISÄTIETOJA : [CDC COVID-19 Clean & Disinfect Recommendations.](#)
[Ajankohtaista koronaviruksesta / THL](#)